

軽度の鼻出血に新しい提案

チケア® Chi-care®



分かりやすい使い方、シンプルな止血方法



滅菌済のため、開封後すぐに使用可能

特徴

● 血液の吸収

本品は吸収力の高いバイオポリマーです。

● ゲル化による取り出しの容易さ


血液を吸収することによりゲル化し、湿潤環境を保ちます。

使用目的又は効果


創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材です。

参考
使用例


① 開けて ② よじって ③ 入れるだけ

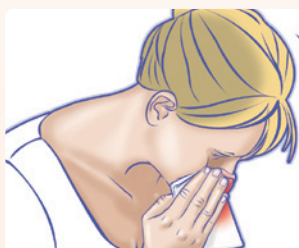


①
前かがみになり、凝血塊を取り除くため、やさしく鼻をかんてください。

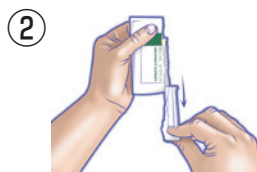


②
無菌パックを開封し、本品を取り出してください。

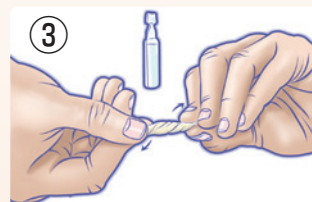

③
鼻腔への挿入に際しては、鼻腔の大きさに合うよう、よじるか、折りたたむなど本品の大きさを適切に調節してください。但し、本品を切ったり、繊維をほどこいたりしないでください。

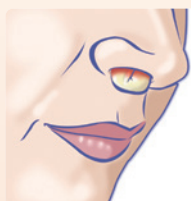

④
容易な取り出しのため、図のとおり本品を鼻腔の外にすこし残して挿入し、鼻をつまんでください。

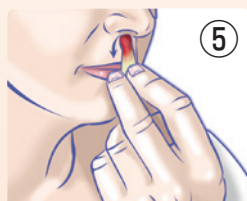

⑤
親指と人差し指で挟み、抜去してください。



⑥
パックを使い、使用済みの本品を破棄してください。

* 小さな鼻腔には、より容易な挿入のため、生理食塩液(0.9%塩化ナトリウム)で本品を潤してください。

* 本品は、30分以内には必ず抜去してください。

* 出血が続く場合は、新たに本品を開封し、再度、鼻腔へ30分間挿入してください。

使用上の注意

◎ 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されているが、使用時に包装が破損または、汚損している場合は使用しないこと。

◎ 本品は開封後、直ちに使用すること。

◎ 本品を再滅菌しないこと。

◎ その他の使用上の注意は添付文書をご参照ください。

保管方法及び有効期間等

◎ 直射日光及び高温多湿を避け、室温で保管すること。

◎ 使用期限は製品包装に記載

包装 5枚1箱

【禁忌・禁止】 1) 再使用禁止 [感染の危険性があるため]

2) 併用禁忌 本品にアルカリ性水溶液を使用しないこと。

[アルギン酸カルシウムはアルカリ性溶液に溶けるため]

® : レ・ラボラトワール・プロティエ登録商標



実物大

横約 45mm 縦約 25mm

■ 販 売 名 チケア
■ ク ラ ス 分 類 一般医療機器
■ 承認・認証・届出 13B1X00164000047
■ JMDNコード 34655000

製造元

レ・ラボラトワール・プロティエ
(Les Laboratoires Brothier) フランス

製造販売業者名

株式会社エムビーエス
東京都千代田区外神田6-16-3外神田MNビル

発売元

第一医科株式会社

第一医科株式会社

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
大阪営業所 〒534-0027 大阪府都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
名古屋営業所 〒467-0856 名古屋市中区瑞穂区新開町28-26 Tel 052-882-3991 Fax 052-882-3992