

パイプアダプター のご紹介

Q パイプアダプターってなに？

- パイプアダプターは、人工喉頭でうまく話すことが難しい方のための補助器具です。
- ユアトーン之音をパイプで直接口の中へ響かせるので、すぐに話せるようになります。



うまく響かない



うまく
声が出た!!

声が明瞭にならない

聞き取りやすい!

ユアトーンを押し当てると喉が痛い

押し付けないので
喉が痛くない!

○ 製品写真



○ 使用イメージ




Q どんな人が使ってるの？

- 手術直後等で喉の痛みがあり、人工喉頭を喉に押し当てられない方
- 治療の影響等で人工喉頭の声が響かない方
- 人工喉頭を使いはじめたばかりで、まだうまく声が出せない方
- 体力低下や麻痺等により人工喉頭を喉に当てるのが困難な方



Q パイプアダプターで声が出る仕組み

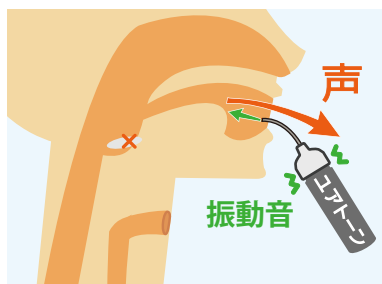

パイプアダプターはパイプを通して、ユアトーンの音を直接口の中へ響かせるための補助器具です。ユアトーン先端にパイプアダプターを取り付けてパイプを口に咥え、ユアトーンの発声ボタンを押すと、パイプの中を通過してユアトーンの「ブー」という音が口の中に送り込まれます。口と舌を動かすと、その音が話し声になります。

○ セット内容



- ・アダプター本体
- ・交換用パイプ × 5本 他

○ 対応機種

- ・ユアトーン標準型 <S-1 モデル>
- ・ユアトーン高機能型 <G-1 モデル>
- ・ユアトーンII・ゆらぎ
- ・ユアトーンII・UB

○ 価格

メーカー希望小売価格

¥2,800 (税抜)

○ 主な仕様

- ・製品名称：ユアトーン専用オプション品
パイプアダプター
- ・型式：DYPAS-01
- ・大きさ：長さ 約 190mm
(パイプ部を含む)
本体直径 37mm
- ・材質：- アダプタ部 ABS
- パイプ部 エラストマー
※食品衛生法適合

別売品のご案内

- ・品名：パイプアダプター専用パイプ
(5本入)
- ・型式：DYPAP-01
- ・メーカー希望小売価格：

¥1,500 (税抜)

販売

販売に関するお問い合わせ

ENTFirst

第一医科株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目27番16号

<http://first-med.co.jp>

TEL 03-3814-0111

FAX 03-3814-0135

製造

製品に関するお問い合わせ

DENCOM 電制コムテック株式会社
ブランド事業部

〒067-0051

北海道江別市工栄町8番13号

<https://www.dencom.co.jp>

 0120-422-102

FAX 011-380-2123

E-Mail: yourtone@dencom.co.jp